


ジルコニアクラウン プレパレーションガイド


チェアサイド

前歯支台歯形成 (コーピング)

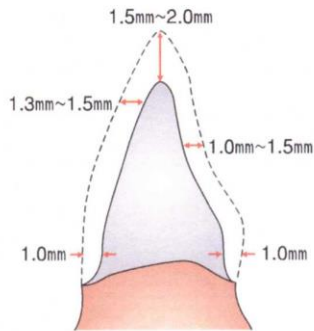


支台歯形成は丸みを帯びた形態にし、鋭角なエッジのある形成は避けてください。
(CAMマシンのバーが鋭角な部分の加工ができなくなるため)

臼歯支台歯形成 (コーピング)

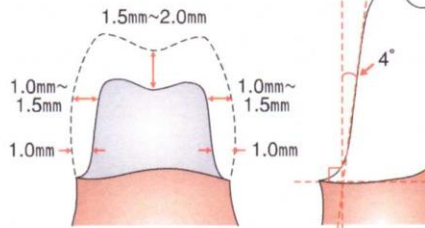


軸面のテーパーは支軸に対し4度以上に形成してください。

臼歯支台歯形成 (フルクラウン)

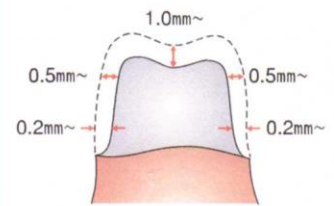


深い溝や窩を付与したい場合は、コーピングの支台歯形成を参照してください。


禁忌事項

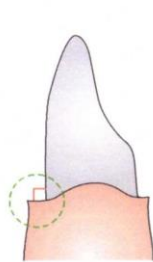


90°のショルダー

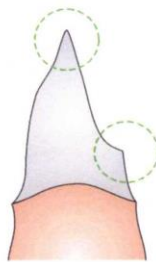

鋭利な角

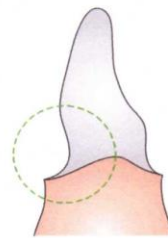

アンダーカット

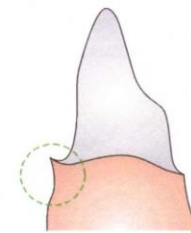

ジャンピングショルダー

- ・フェザーエッジ
- ・ナイフエッジ
- ・テーパーが0度のもの
- ・マージンラインが凸凹なもの
- ・グループ加工
- ・ショルダーの長いもの

禁忌な支台歯形成の場合は、製作できない可能性があることをご了承ください。

ゆうデンタル
LABO

有限会社 ゆうデンタル TEL 0120-515-418
〒722-0024 広島県尾道市西則末町 6-7
ホームページ <http://www.you-dental.jp>
E-mail you-dental@go2.enjoy.ne.jp